

Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis DENTOFLEX abrangem três famílias de produtos: CERA-ONE (modelo paralelo), CICATRIZADOR (modelo paralelo, modelo com perfil de emergência e modelo para Esteticone) e ESTETICONE (modelo angulado e modelo paralelo) cada um é utilizado sobre implantes de Hexágono Interno, Hexágono Externo, Cone Morse ou Flex.

Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis DENTOFLEX são produtos utilizados no preparo e colocação da prótese dentária, foram projetados com a finalidade de guiar a cicatrização adequada do tecido gengival perimplantar, e oferecer resistência à pressão e forças laterais exercida sobre o implante. Devendo somente ser manuseado por profissionais especializados.

Simbologia Norma NF EN 980:



Fabricação



Validade



LOT N° de lote



Ver instruções de Uso



Produto de Uso Único



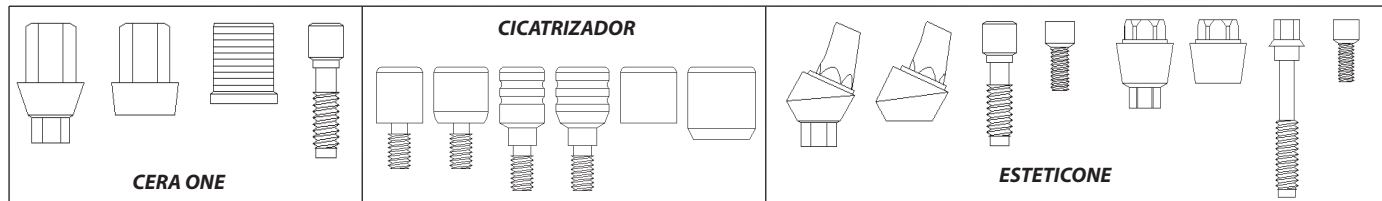
Armazenar em lugar seco, fresco e livre da luz do s

Indicação de Uso:

CERA ONE	O cera-one é um munhão com um espaço interno cilíndrico (oco e liso) e com formato externo hexagonal, para ser utilizado em próteses unitárias cimentadas. sendo todos de modelo paralelo. Foi especialmente projetado para oferecer maior resistência à pressão exercida sobre o implante, no caso de próteses unitárias, fixar o parafuso com auxílio de uma chave para torquímetro e um torquímetro para prótese, com torque de 30 a 32 N.			
CICATRIZADOR	O cicatrizador é utilizado na segunda fase de uma cirurgia de implantes, com a finalidade de guiar a cicatrização adequada do tecido gengival perimplantar, moldando o espaço da prótese dentária na gengiva do paciente e fixa-lo manualmente com auxílio de uma chave digital.	Para implante	PARALELO	É identificado por duas medidas: diâmetro do implante (2,95 à 6,00mm) e altura do cicatrizador (3, 5 e 7mm), utilizado onde a estética não é fator preponderante.
			PERFIL DE EMERGÊNCIA	É identificado por três medidas: diâmetro do implante (2,95 à 6,00mm), altura do cicatrizador (2 a 6mm) e largura do cicatrizador (5, 6 e 7,5mm), utilizado onde a estética é fator preponderante.
		Para esteticones	PARALELO	É fornecido com 5,0 mm de diâmetro e 6,5 mm de altura, utilizado para cobrir o esteticone, funcionando a um só tempo, como capa de cicatrização e tampa.
			PERFIL DE EMERGÊNCIA	É fornecido com 5,0 mm de diâmetro na base, 6,0 e 7,5 no topo e todos 6,5 mm de altura, utilizado para cobrir o esteticone, funcionando a um só tempo, como capa de cicatrização e tampa.
ESTETICONE	O esteticone é um munhão composto de três partes, para ser utilizado sobre implantes unitários e múltiplos, para próteses parafusadas. Foi especialmente projetado para oferecer maior resistência à pressão exercida sobre o implante, no caso de próteses unitárias ou fixas. Fixar o parafuso com auxílio de uma chave para torquímetro e um torquímetro para prótese, com torque de 20N para parafuso central e 10N para micro parafuso.	Paralelo ou angulado	LUVA ANTI ROTACIONAL	Utilizada em prótese permanente parafusada unitária.
			LUVA CIRCULAR	Utilizada em prótese permanente parafusada fixa.

Composição:

FAMILIA	MODELO	USO NO IMPLANTE	MATÉRIA PRIMA			DIÂMETROS		ALTURAS							MEDIDAS ESPECIFICAS					
			COMPONENTE	PARAFUSO	COIFA	HI	HE	1	2	3	4	5	6	7						
			TITÂNIO		POLIMERO															
CERA ONE	PARALELO	HI / HE / CM	F -136	F -136	POLIACETAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
CICATRIZADOR	PARALELO	FLEX	F - 67														X			
				PERFIL DE EMERGÊNCIA															X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5
		CM	F -67							X	X	X	X	X	X					PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5
				PERFIL DE EMERGÊNCIA							X	X	X	X	X	X				
	PARALELO	HI	F -67				X				X	X	X	X	X					
				HE						X	X	X	X	X	X					
		HI	F -67				X				X	X	X	X	X					PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5
				HE						X	X	X	X	X	X					PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5
		HE	F -136				X												X	
				PERFIL DE EMERGÊNCIA				X												X
ESTETICONE	ANGULADO	CM	F -136							X	X	X							ANGULOS 17/22/30	
				PARALELO						X	X	X	X	X						
	PARALELO	HI / HE				X	X	X	X	X									ANGULOS 17/22/30	
			ANGULADO				X	X	X	X	X	X	X							

**Acessórios:**

CERA ONE - Chave para torquímetro e Torquímetro para prótese, são acessórios para colocação do cera one e vendidos separadamente.

CICATRIZADOR - Chave digital, é um acessório para colocação do cicatrizador e vendidos separadamente. □

ESTETICONE - Chave para torquímetro e Torquímetro para prótese, são acessórios para colocação do esteticone e vendidos separadamente.

Luva Metálica Anti-Rotacional para Esteticone, □Luva Metálica Circular para Esteticone, □Luva Plástica Anti-Rotacional para Esteticone ou □Luva Plástica Circular para Esteticone, são acessórios para uso exclusivos do esteticone e vendidos separadamente.

PRECAUÇÕES

As técnicas restauradoras requisitadas para a realização da prótese sobre implante são altamente especializadas e envolvem procedimentos complexos. A seleção imprópria de componentes protéticos e/ou técnicas pode causar o fracasso do implante e a perda da prótese.

RESTRIÇÃO

A prótese sobre implantes é inviabilizada quando os implantes são posicionados extremamente inclinados (acima de 35°, impedindo que se consiga fazer corretamente a restauração dentária).

ADVERTÊNCIAS

A condição original do produto, enquanto produto ESTÉRIL, só se manterá enquanto sua embalagem se mantiver inviolada e pelo tempo declarado de validade da esterilização. Para manter sua condição original, a embalagem deve ser aberta somente durante a cirurgia e em lugar esterilizado (campo cirúrgico).

É concebido para USO ÚNICO garantindo seu desempenho máximo e PROIBIDO REPROCESSAR.

CONTRA-INDICAÇÃO

Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis deve ser utilizado apenas como indicado.

DESCARTE DO PRODUTO

Caso ocorra a necessidade de descarte do produto o profissional deverá seguir as leis vigentes para descarte de produto contaminado.

ESTERILIZAÇÃO

Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis já embalados recebem um selo RADIOSENSIVÉL na cor amarela o qual depois do processo o mesmo deverá estar na cor vermelha, devido ao processo de esterilização que é feito com Raios Gama Cobalto-60.

ARMAZENAMENTO

Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis devem ser armazenados em local limpo, seco, arejado e livre da luz do sol.

TRANSPORTE

A embalagem protege o produto contra quedas e colisões. Todavia, em transportes de longa distância, o produto deve receber uma proteção adicional.

