



INSTRUÇÃO DE USO – PONTA DE ULTRASSOM Versão 01



Esta Instrução de Uso pode ser utilizada para os produtos integrantes do registro 10272310036 – Ponta de Ultrassom – Ponta Ultrassônica

Antes da utilização da presente instrução de uso, observe a sua versão, e somente a utilize se estiver de acordo com o informado no rótulo do produto. A presente instrução de uso, em formato impresso, pode ser obtida, sem custo adicional, através de solicitação para o e-mail sac@inp-dentoflex.com.

Instrução de uso elaborada em conformidade com a Instrução Normativa DC/ANVISA Nº 4 DE 15/06/2012.

MATERIAL

Ponta de Ultrassom – Aço Inoxidável conforme AISI 420(NBR 13911)

Componentes da embalagem:

Estão contidos nesta embalagem:

| Produto | Componentes da embalagem |
|-----------------|--------------------------|
| Ponta Ultrassom | 01 Ponta Ultrassônica |

A embalagem consiste em um invólucro de papelão e um blister.

INDICAÇÃO

As pontas ultrassônicas são instrumentos confeccionados para assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso cortar ossos e tecidos duros. Esses instrumentos foram projetados para serem utilizados em motores cirúrgicos de ultrassom.

As pontas ultrassônicas podem ser utilizadas em:

- cirurgia oral: extração, apicetomia, cistectomia e osteogenese de distração



- implantologia: osteotomia de abertura no osso, expansão de fenda, coleta de pedaços de osso, coleta de osso monocortical, osteoplastia, preparação final do local de implantação, extração para implantação imediata, elevação da membrana de Schneider
- cirurgia periodontal: osteotomia e osteoplastia, coleta de tecido para osso em cirurgia regenerativa, fragmentação de raiz, planificação de raiz
- ortodontia cirurgia: exposição ou extração de dentes que não sofreram erupções, cortocotomia ortodôntica
- cirurgia ortognática: osteotomias maxilares e mandibulares e alveolares
- todas as demais cirurgias com abordagem óssea

ADVERTENCIAS

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.
As pontas ultrassônicas deverão ser usadas somente para finalidade específica para as quais foram desenvolvidas.
Descartar conforme legislação ou norma vigente
Fabricante recomenda uso único
Não utilizar o produto se houver sinais de dano do mesmo
O produto deve ser inspecionado antes do uso

PRECAUÇÕES


Em caso de queda acidental do produto, inutilizar o mesmo.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O produto deve ser armazenada e transportada em local limpo e seco, de modo a evitar dano na embalagem.
Não acondicionar junto com produtos e resíduos que possam desprender vapores corrosivos.
Não acondicionar de forma a danificar a estrutura inicial do produto e sua embalagem.
Evitar batidas e quedas.

DESCARTE

Em caso de descarte seguir legislação ou norma vigente

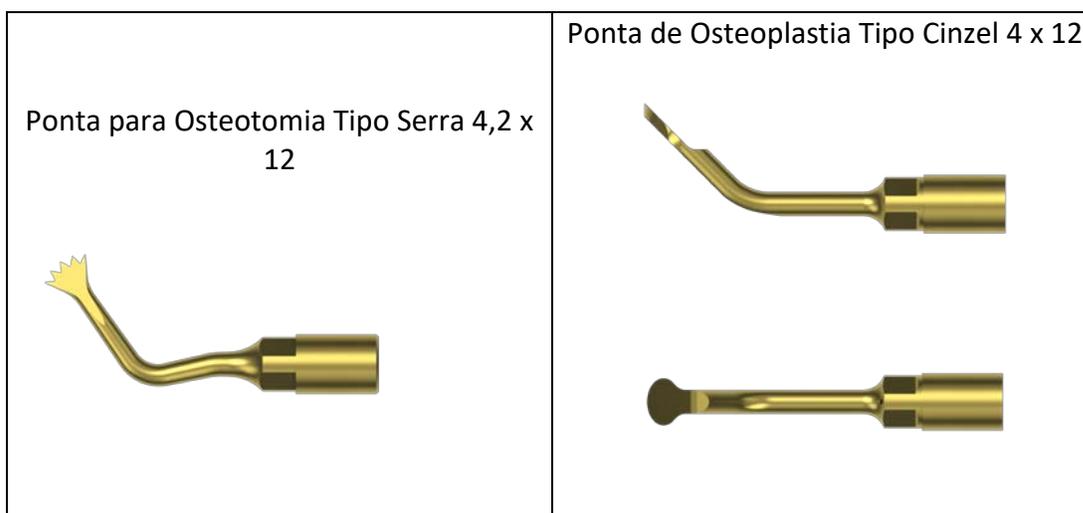

****IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS****

Esclarecimentos sobre o uso do produto médico:

Qualquer dúvida sobre o produto, solicitação de informação ou solicitação de instrução de uso em formato impresso sem custo adicional, o distribuidor ou fabricante deverá ser comunicado. Fabricado por:

Sistema de Implantes Nacionais e de Próteses Comercio Ltda

Rua Marques de Marica, 1230

Sao Paulo – Sao Paulo – Brasil

Cep: 04252-000

Tel: +55 11 2083-4130

www.dentoflex.com.br

Responsável Técnico: Pedro Velasco Dias – CROSP nº 12.294