



dentoflex.inp

sistema de implantes

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2025

Search



SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA

A linha Search veio com uma evolução aos implantes longos. Criado com base no Cone Morse esse implante pode ser utilizado nas técnicas All-on-four e pterigóideo.

CARACTERÍSTICAS:

Produzido em Titânio ASTM F67

Grau IV

Corpo cônico, rosca dupla

Apresenta cone de 11,5° e rosca

1,8 mm

Plataforma Switch

Alta estabilidade inicial

Indicado para colocação na profundidade de 1, 2 e 3mm

Para posicionamento intraósseo é recomendado adicionar 1 a 2 mm ao comprimento do implante durante a instrumentação cirúrgica

Acompanha tapa implante

Para osso tipo III e IV


CHAVES DE CAPTURA E INSTALAÇÃO DO IMPLANTE



Disponível nos tamanhos Curto e Longo

Descrição	Código
Chave Catraca Curta	55882
Chave Catraca Longa	55883
Chave C.A Curta	55834



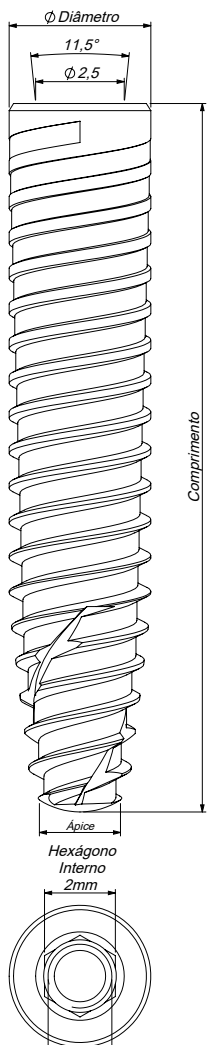

Diâmetro

Comprimentos

Ø 3,75	18 mm 59756	20 mm 59757	22,5 mm 59759	25 mm 59761
Ø 4,00	18 mm 59762	20 mm 59763	22,5 mm 59765	25 mm 59767

Sequência de Brocas

Implante	Lança	Helicoidal Ø2,30MM Longa	Supreme Ø3,75MM Longa	Supreme Ø4,00MM Longa
3,75 mm	●	●	●	
4,00 mm	●	●	●	●

● Para osso tipo III e IV

TAPA IMPLANTE



1,0 mm

56839

MIRUSCONE ANGULADO



1,5 mm	17°	57925
1,5 mm	30°	57927
1,5 mm	*45°	60110
2,5 mm	17°	57928
2,5 mm	30°	57963
2,5 mm	*45°	60113
3,5 mm	17°	57964
3,5 mm	30°	57966

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Com Index
- ✓ Com parafuso passante
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total
- ✓ *Indicação de uso apenas nos implantes Zigomático e Search em protocolo.

MIRUSCONE RETO



0,8 mm	57910
1,5 mm	57911
2,5 mm	57915
3,5 mm	57919
4,5 mm	57923
5,5 mm	57924

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

Kit Search



Kit único e versátil: evite volume, priorize a qualidade, funcionalidade, e a eficiência no seu dia a dia.

PARA USO NA

Linha Search

GARANTA AGILIDADE E PRATICIDADE AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Criado especialmente para garantir a eficiência no dia a dia do seu consultório.

60231

KIT SEARCH

60230

ESTOJO KIT SEARCH

CARACTERÍSTICAS:

Cod.	Descrição	Qtd.
59926	BROCA LANÇA	1
59988	BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA	1
59922	BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA	1
60009	BROCA SUPREME Ø4 LONGA	1
59870	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6	1
59871	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9	1
59872	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2	1
59873	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7	1
55882	CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
55834	CHAVE CURTA P/ IMP. OSSEO COMP. CONE MORSE P/ C. A.	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
01379	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA	1
55883	CHAVE LONGA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
01393	CHAVE T FIXA	1
59711	GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR	1
60088	MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM	1
60089	MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM	1
60090	MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM	1
60084	SONDA CALBRADA PARA IMPLANTE LONGO	1
01415	CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ANGULO	1

BROCAS

59926



BROCA LANÇA

59988




BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA

59922



BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA

60009

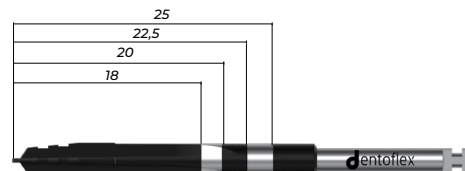

BROCA SUPREME Ø4,00 LONGA

CHAVES

CHAVES DE CAPTURA

55834



CHAVE PARA IMPL. C.M. PARA CONTRA ÂNGULO

CHAVE DE CAPTURA DE CONTRA ÂNGULO,
TORQUE MÁXIMO 35 N.cm

CHAVES DE INSTALAÇÃO

55882



CHAVE CURTA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

55883



CHAVE LONGA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

01379



CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA

01415



CHAVE DE MONTADOR PARA CONTRA ÂNGULO


EXPANSORES

59870



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6

59871

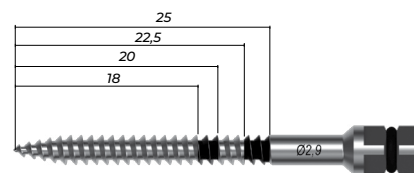

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9

59872



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2

59873



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7

MEDIDORES


60088

MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM



60089

MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM

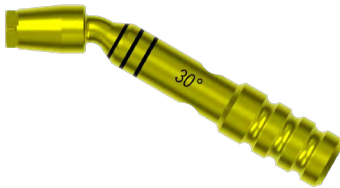

60090


MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM



ACESSÓRIOS

60084

SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE LONGO

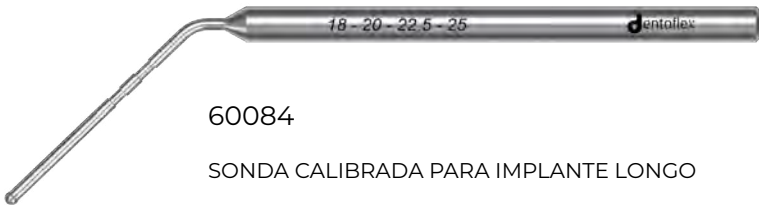


01393

CHAVE T FIXA



59711

GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR

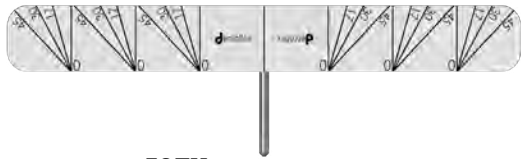

08877

CHAVE DE TORQUE





GUIA PARA MONTAGEM

Kit Search

1. Broca lança 
2. Broca helicoidal Ø2,3 longa 
3. Broca supreme Ø3,75 longa 
4. Broca supreme Ø4,00 longa 
5. Chave p/ impl. CM p/ C.A. 
6. Chave curta p/ impl. O.C. CM p/ catraca 
7. Chave longa p/ impl. O.C. CM p/ catraca 
8. Chave de montador p/ C.A. 
9. Medidor de Ang. 17° e transmucoso CM 
10. Medidor de Ang. 30° e transmucoso CM 
11. Medidor de Ang. 45° e transmucoso CM 
12. Chave digital hexagonal média 
13. Expansor laminador cônico longo Ø2,6 
14. Expansor laminador cônico longo Ø2,9 
15. Expansor laminador cônico longo Ø3,2 
16. Expansor laminador cônico longo Ø3,7 
17. Sonda Calibrada para implante longo 
18. Chave T Fixa 

19. Guia de posicionamento all on four

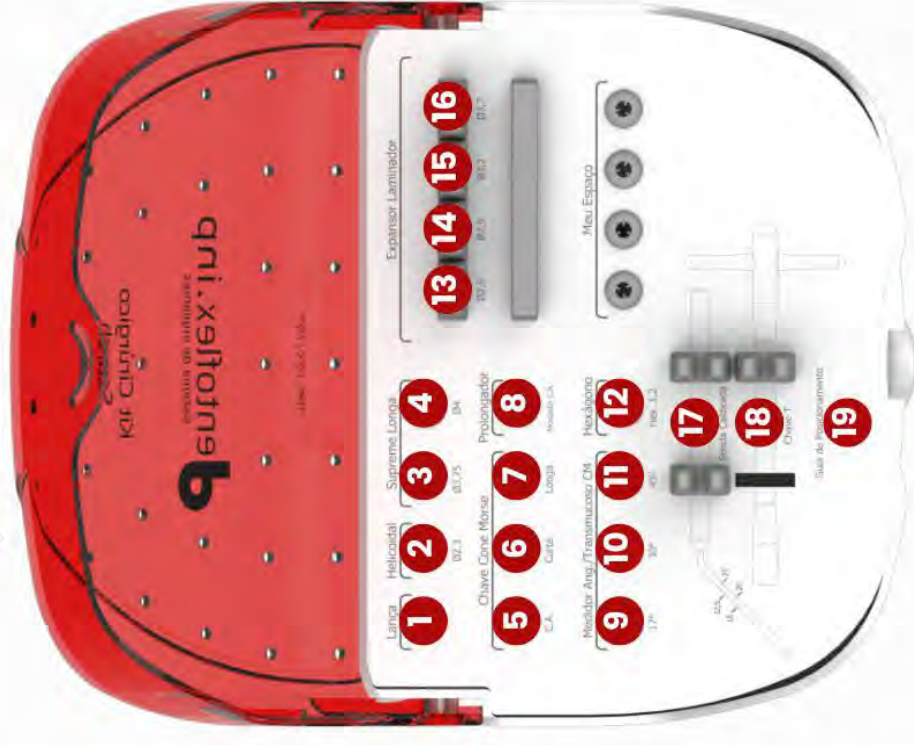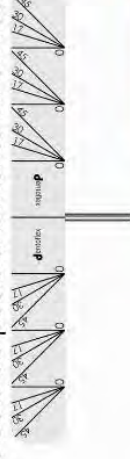


GUIA PARA MONTAGEM


Kit Search

20. Chave de torque




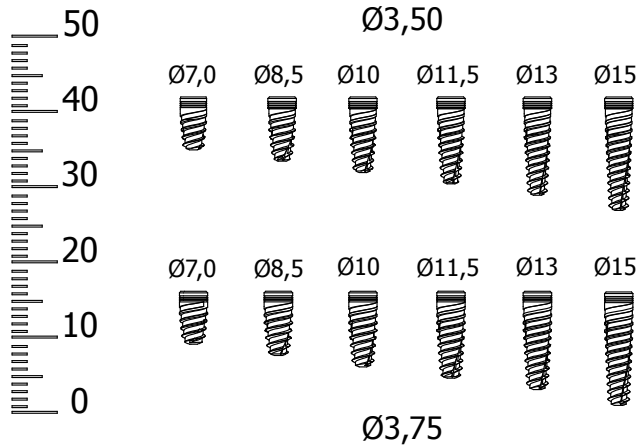


dentoflex.inp
sistema de implantes

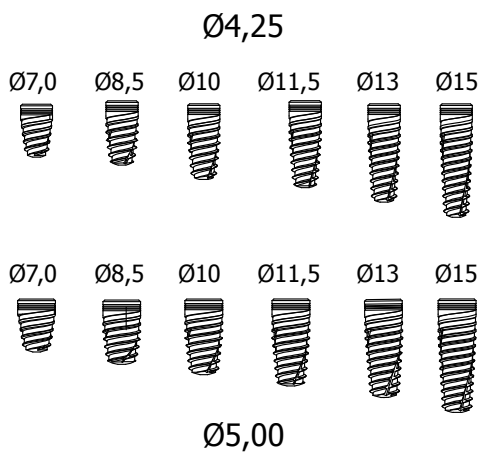


Supreme
HI/Cone Morse

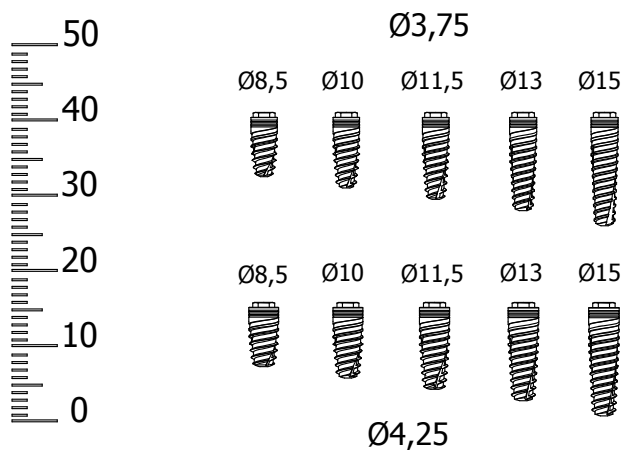


dentoflex.inp
sistema de implantes

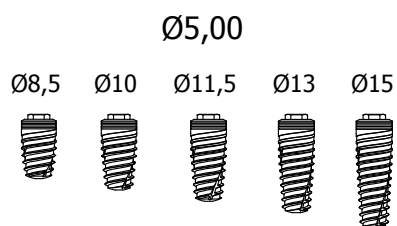


Supreme
Hexágono Externo

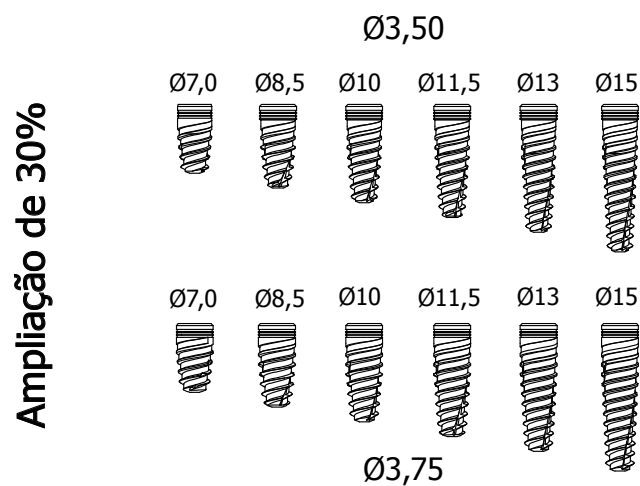


dentoflex.inp
sistema de implantes

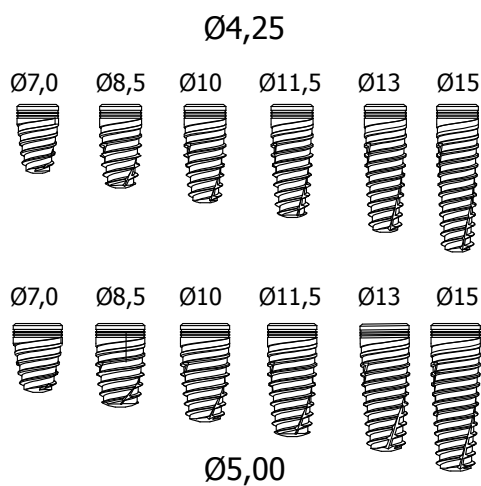

Supreme
HI/Cone Morse

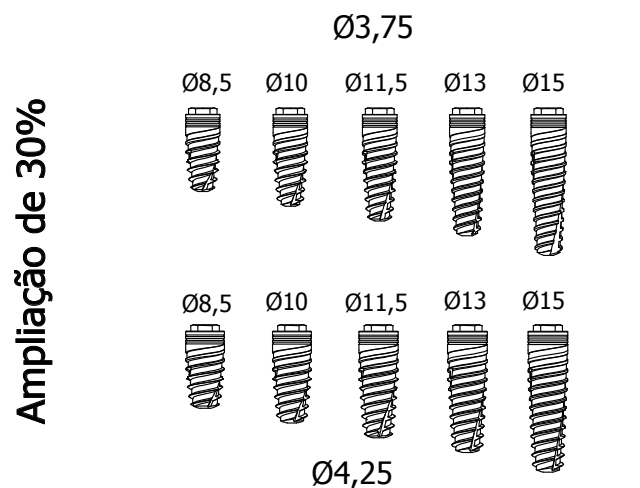

dentoflex.inp
sistema de implantes

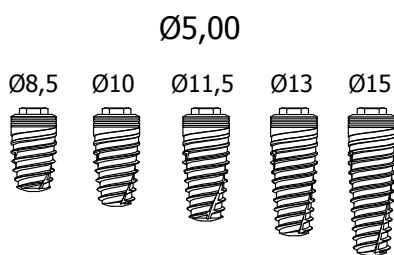



Supreme
Hexágono Externo


Search


Brocas

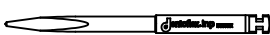

Lança 

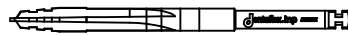Ø3,75 

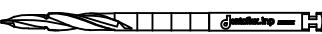
Ø2,3 

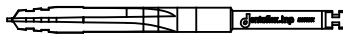Ø4,0 


Supreme

Brocas

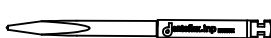


Lança 

Ø3,5 

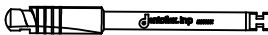
2,8-3,5 

Ø3,75 

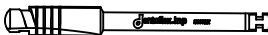
3,0-3,75 

Lança Ø2,3 

Ø4,25 

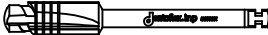3,6-4,25 

Ø5,00 

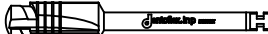
4,25-5,0 


Z.FORCE


Zygomatic

Brocas

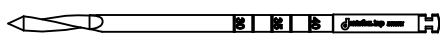



Ø2,2 

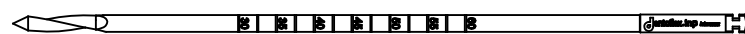Ø2,2 

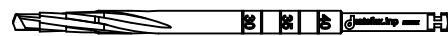Ø3,0 

Ø3,0 

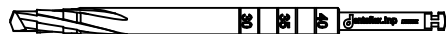Ø3,5 

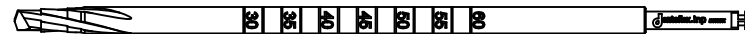Ø3,5 

Ø4,0 



🌐 dentoflex.com.br
✉ sac@inp-dentoflex.com
☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130
📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

📷 @DENTOFLEX.OFICIAL